


# Ersthilfe bei Herzstillstand


Jeder kann Leben retten.

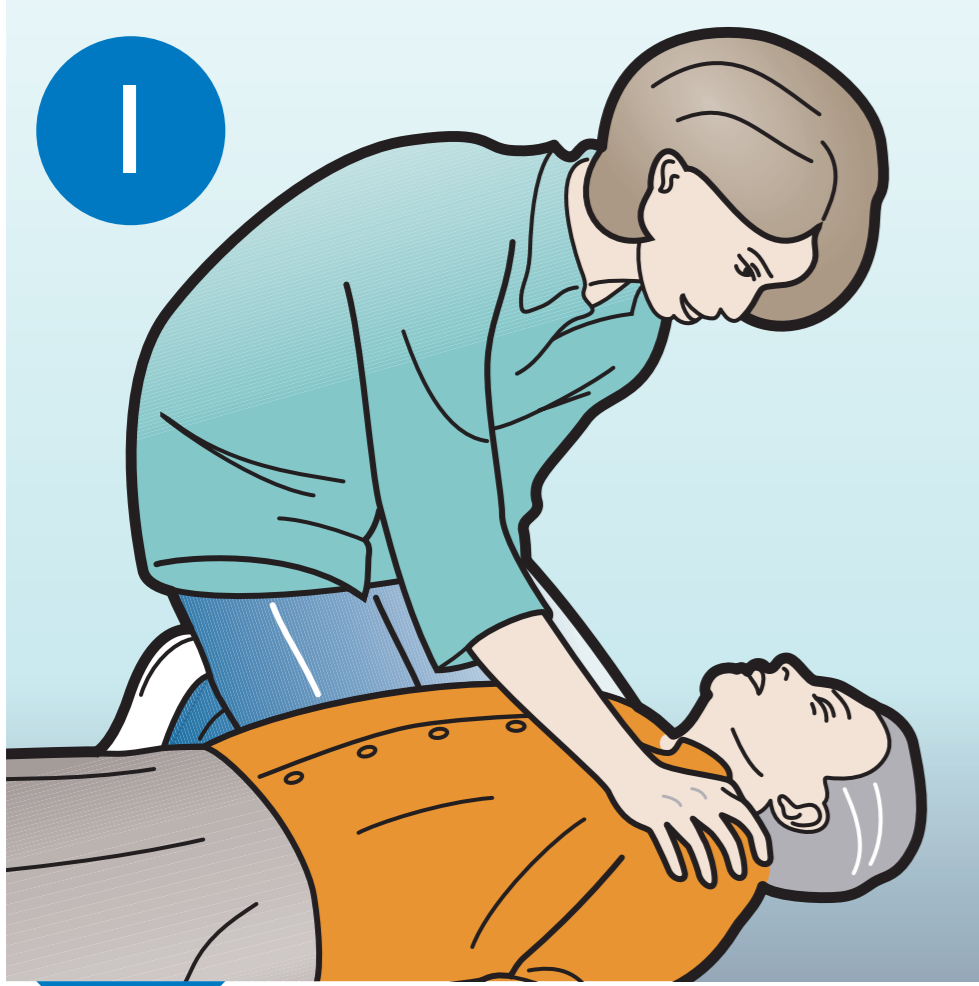

**1**  
Ansprechen  
Lebenszeichen?  
Keine Reaktion?



**2**  
Laut Hilfe rufen  
Notruf (112)

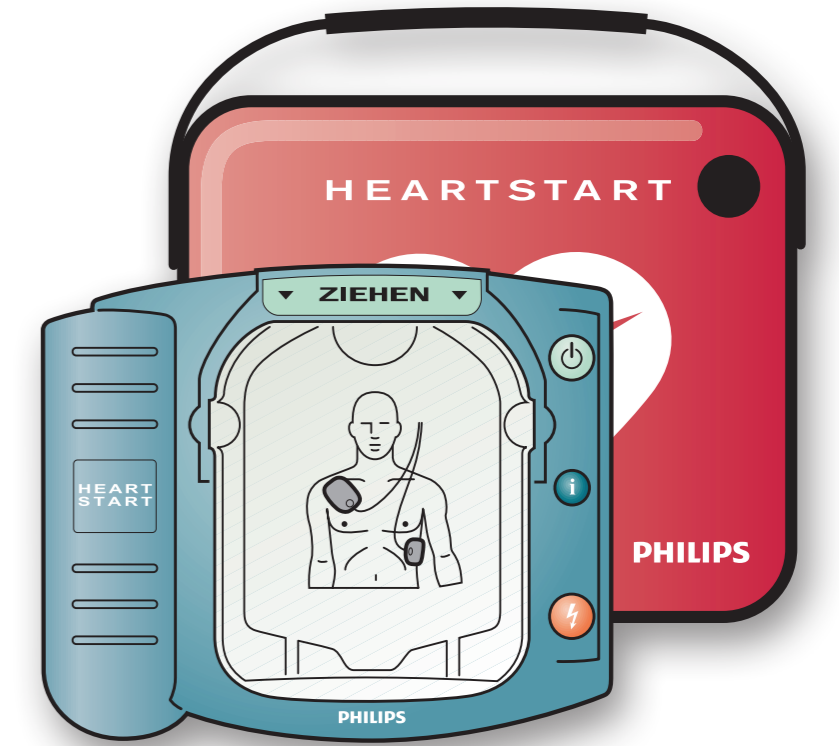


Philips Heartstart HS1



**3**  
Keine normale  
Atmung? Keine  
Lebenszeichen?  
Atemwege freimachen

Defi holen lassen

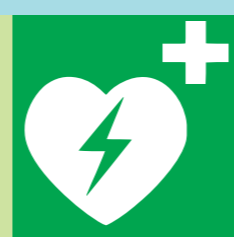

**1** Einschalten



**2** Pads anlegen



**4**  
Herz-Lungen-  
Wiederbelebung  
starten


Drucktiefe: min. 5 cm  
30 Kompressionen  
Frequenz:  
min. 100/Minute



Anleitung  
Herz-Lungen-  
Wiederbelebung  
über **i**-Taste



**3**  
Schocktaste

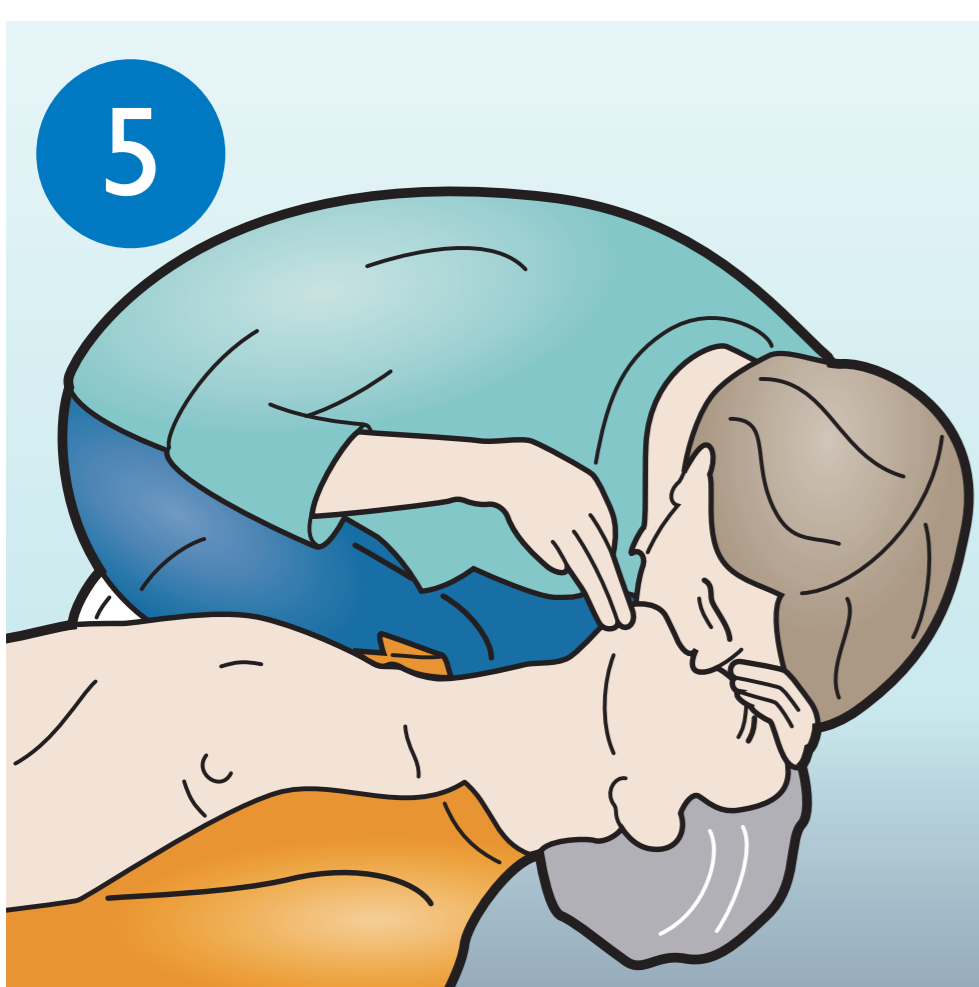

**5**  
2x Beatmen